



NÁVOD K INSTALACI PACIENTSKÉ ZÁSTĚNY PARFLEX NA STĚNU

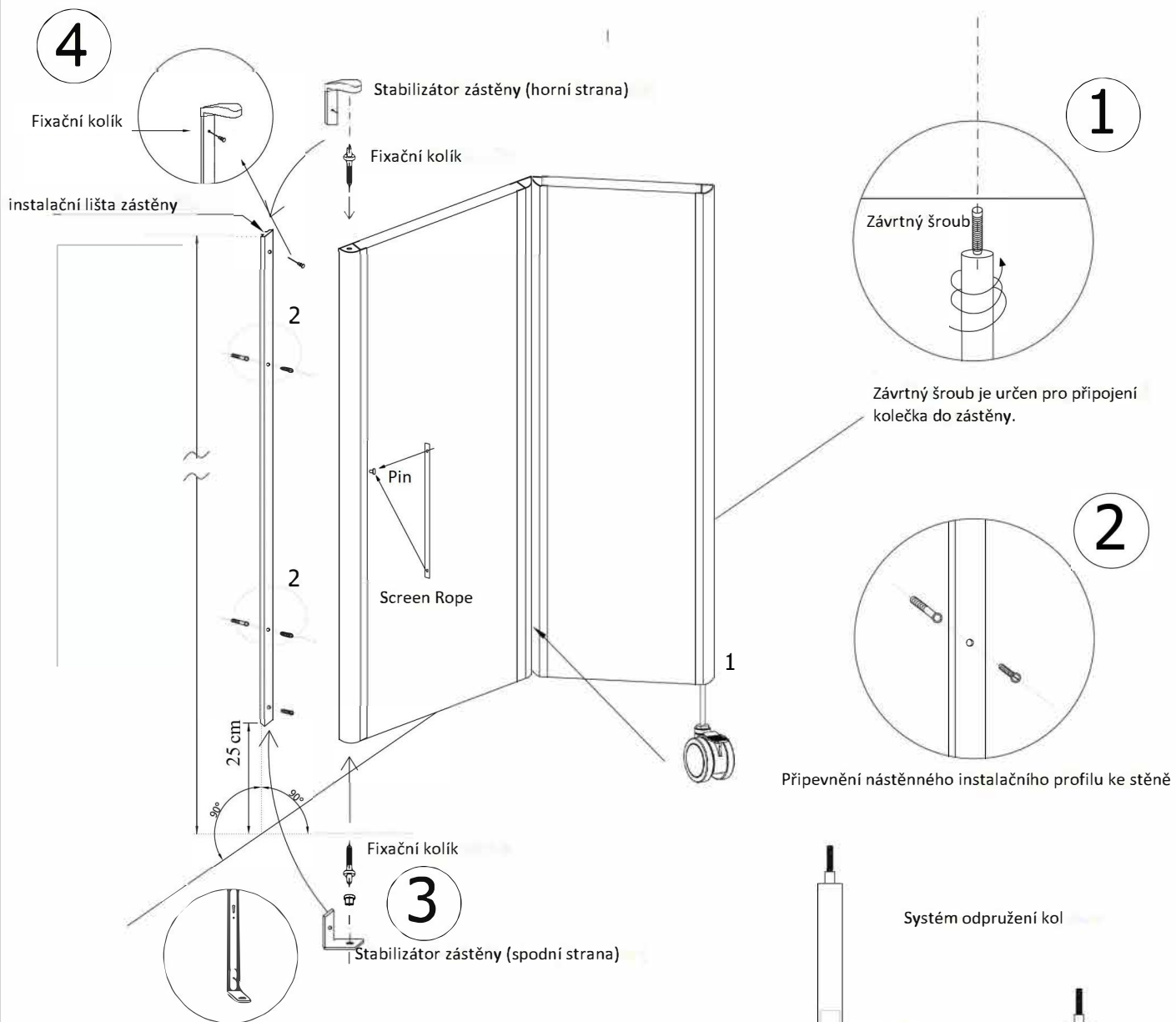

Připevnění nástěnného instalačního profilu ke stěně

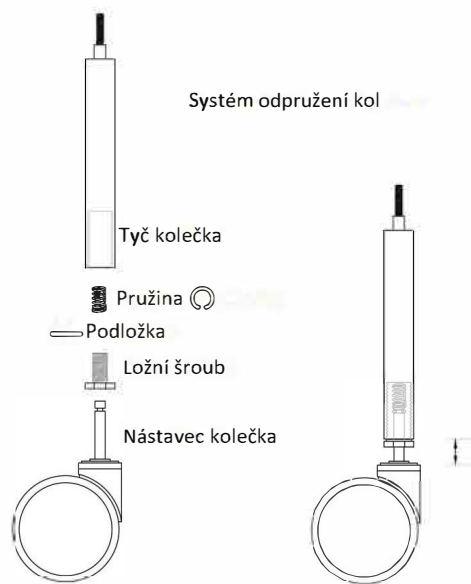

- 1- Kolečka se připojit k zástěně. (Obr. 1)
- 2- instalační profil zástěny upevnit na stěnu pomocí plastových hmoždinek. (obr.2)
- 3- Stabilizátor zástěny (spodní strana) připojit k instalačnímu profilu zástěny. Poté zástěnu připojit ke stabilizátoru zástěny (spodní strana) (obr.3)
- 4- Stabilizátor zástěny (horní strana) připojit k instalačnímu profilu zástěny. Poté se zástěny uzamkne pomocí stabilizátoru zástěny (horní strana) a samotný stabilizátor zástěny zafixovat pomocí fixačního kolíku. (obr.4)

Parflex
Screen Systems