

# Stručný návod

Přečtěte si prosím informace k produktu. Tento návod nenahrazuje oficiální.

1. Vyjměte hliníkový zásobník.



2. Umístěte drtící misku do držáku a ujistěte se, že je spodní drtící miska usazena a drží v zářezu vyřetém v držáku misky.



3. Vložte tablety do spodní drtící misky a umístěte na ně horní drtící misku. Konfigurace: **CUP-PILLS-CUP**



4. Zavřete hliníkový zásobník a stiskněte tlačítko pro drcení.

5. Po dokončení drcení vyjměte horní a dolní misku **SPOLEČNĚ**.



6. Mimo drtící komoru poklepejte prstem na horní misku, když ji zvedáte, abyste zkontrolovali rozdrčené tablety.

# Stručný návod

Přečtěte si prosím informace k produktu. Tento návod nenahrazuje oficiální.

## SVĚTELNÉ INDIKACE

**ČERVENÁ** (BLIKÁ): Baterie je vybitá, do úplného vybití zbývá 10 stisknutí

**ČERVENÁ** (STÁLÁ): CHYBA - zkontrolujte, zda je úplně zasunutý

**CUP-PILLS-CUP** a hliníkový zásobník na misky

**ZELENÁ** (BLIKÁ): Baterie se nabíjí (připojena k napájení)

**ZELENÁ** (STÁLÁ): Baterie je nabitá na 100 %.

**MODRÁ** (BLIKÁ): (bliká): Cyklus drcení je aktivní

**MODRÁ** (STÁLÁ): Připraveno k drcení

**MODRÁ** (STÁLÁ): Cyklus drcení dokončen

**BATERIE** (před prvním použitím je třeba ji nabít 4 hodiny uvnitř SafeCrush™)

Pokud nenabíjíte baterii, mějte zařízení SafeCrush™ "odpojené" od zdroje napájení.

## ÚDRŽBA

Na konci každého drcení vyčistěte vnitřek drtící komory a vnější část zařízení SafeCrush™ pomocí alkoholové utěrky a poté ji otřete do sucha. **Nepoužívejte peroxid.** Utěrku zlikvidujte, aby nedošlo ke kontaminaci.

